

Bujón podľa Muellera a Hintonovej (MHB)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.

Len na profesionálne použitie.

- Určenie:** Výrobok je určený na prípravu suspenzie baktérií pre zisťovanie minimálnej inhibičnej koncentrácie antibiotík.
- Obsah balenia:** 8 ml a 10 ml roztoku v skúmavke
- Zloženie:** Dehydrovaná mäsová infúzia, kazeínový hydrolyzát, škrob, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte v chlade pri teplote +2°C až +8°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 24 hodín.
- Pracovný postup:** Klinický materiál asepticky naočkujte do pomnožovacej pôdy.
Inkubácia: za optimálnych podmienok 24 hodín pri 35°C.
- Informácia pre používateľov:** Nepoužívajte po dátume expirácie.
Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.
- Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

Kontrola kvality:

Typ kontroly	Naočkovaná kultúra	Výsledok
Pozitívna kontrola	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923 / CCM3953 <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 /CCM 3954 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM3955 <i>Enterococcus faecalis</i> CCM4224	rast kultúry
Negatívna kontrola	nenačkovaná pôda	bez zmeny

Výrobca

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:

Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika