

Bujón živný č. 2 s 2% glukózy (GLUB)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.

Len na profesionálne použitie.

- Určenie:** Výrobok je určený na dôkaz fermentácie glukózy baktériami.
- Obsah balenia:** 5 ml a 10 ml roztoku v skúmavke, 50 ml v NTS fľaške
- Zloženie:** Peptón pre bakteriológiu, chlorid sodný, glukóza, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte v chlade pri teplote +2°C až +8°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 24 hodín.
- Pracovný postup:** Klinický materiál asepticky naočkujte do pomnožovacej pôdy.
Inkubácia: za optimálnych podmienok 24 hodín pri 35°C.
- Informácia pre používateľov:** Nepoužívajte po dátume expirácie.
Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.
- Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

Kontrola kvality:

Typ kontroly	Naočkovaná kultúra	Výsledok
Pozitívna kontrola	<i>Staphylococcus aureus</i> CCM3953 <i>Streptococcus pyogenes</i> CCM4425 <i>Escherichia coli</i> CCM3954	Zmena farby pôdy
Negatívna kontrola	Nenaočkovaná pôda	Bez zmeny

Výrobca

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:

Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika