

Agar vodný (VAGAR)

In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka.

Len na profesionálne použitie.

Sterilné

- Určenie:** Výrobok je určený na sledovanie mikromorfologických vlastností vláknitých húb.
- Obsah balenia:** 18 ml v petriho miske
- Zloženie:** Agar, peptónová voda, demineralizovaná voda
- Skladovanie:** Skladujte v chlade pri teplote +4°C až +6°C.
- Použitelnosť:** Po otvorení primárneho obalu spotrebujte do 24 hod.
- Pracovný postup:** Klinický materiál asepticky naočkujte na povrch pôdy.
Inkubácia: za optimálnych podmienok 24 hodín pri 35°C.
- Informácia pre používateľov:** Pôdu nepoužívajte, ak nesie známky mikrobiálnej kontaminácie, zmenu farby, vysušenie, prasknutie alebo iné znaky poškodenia. Všetky vzorky a inokulované produkty musia byť považované za potenciálne infekčné a pri manipulácii s nimi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.
Nepoužívajte po dátume expirácie.
Použité aj nepoužité produkty likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov.
- Pokyny pre prípad poškodenia obalu:** V prípade poškodenia obalu nepoužívajte, výrobok dajte na likvidáciu.

Kontrola kvality:

Typ kontroly	Naočkovaná kultúra	Výsledok
pozitívna kontrola	Candida albicans ATCC 10231/CCM 8261 Candida parapsilosis CCM 8260	rast kultúry
negatívna kontrola	nenačkovaná pôda	bez zmeny

Výrobca

EnviroLab s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka:

Obchodná ulica 7
946 51 Nesvady
Slovenská republika